

parkell today

SBIANCAMENTO & IPERSENSIBILITÀ



Dall'impronta alla mascherina di sbiancamento in pochi minuti!

Trattamento biocompatibile e bioattivo dell'ipersensibilità dentinale



"Predicta® Desensitizer è molto efficace, blocca immediatamente la sensibilità per diversi giorni e con una seconda applicazione riduce drasticamente la sensibilità a lungo termine. "

Prof. Consuelo Sanavia, Igienista Dentale

"È un desensibilizzante di nuovissima generazione e non crea una pellicola sui denti come altri prodotti ma chiude i tubuli dentinali sfruttando il processo di remineralizzazione. "



Dr.ssa Simona Giani, Odontoiatra

MACH®

Silicone per modelli

- Silicone ad indurimento rapido, particolarmente scorrevole, per creare modelli precisi e leggermente flessibili per realizzare mascherine di sbiancamento, intarsi diretti o indiretti, provvisori, ferule periodontali in composito fibrorinforzato e per la riparazione di impianti protesici mobili.
- Raggiunge un'elevata durezza (90 Shore A) in soli 2 minuti.



ART.	DESCRIZIONE
S433S	Mach® Die-Silicone 2x50ml, 10 puntali, 10 erogatori intraorali

Ricambi

S302	Puntali a base gialla, 30 pezzi
S308	Erogatori intraorali grigio, 50 pezzi.

Blu-Mousse®

Silicone per la registrazione dell'occlusione

- Silicone per addizione VPS radiopaco e tissotropico, da decenni il materiale di riferimento per la registrazione oclusale.
- Indurisce come il gesso (90 Shore A).
- Dimensionalmente stabile, non si altera nel tempo.
- Tempi di indurimento: 30 secondi, 60 secondi o 2 minuti.



KITS CONTENENTI:
2 x cartucce 50ml (totale 100 ml) e 6 puntali erogatori a base rosa.

ART	PRODOTTO	TEMPI	GUSTO
S457S	Blu-Mousse Super-Fast	30 Sec	Insapore
S448S	Blu-Mousse Super-Fast	30 Sec	Menta
S440S	Blu-Mousse 60	60 Sec.	Insapore
S438S	Blu-Mousse Classic	2 Min.	Insapore
S437S	Blu-Mousse Classic	2 Min.	Menta

Accessori

S445	30 x puntali erogatori a base rosa
------	------------------------------------

DALL'IMPRONTA ALLA MASCHERINA DI SBIANCAMENTO IN SOLI 20 MINUTI!

Prendere un'impronta in alginato e iniettare Mach Die Silicone.



Aggiungere Blu-Mousse per ottenere una base stabile.



Separare il modello dall'impronta.



Fabbricare la mascherina pronta all'uso.



Scansiona il codice per vedere il video.



Predicta® desensitizer

BIOACTIVE




Sollievo rapido ed efficace dall'ipersensibilità dentinale

Gel desensibilizzante altamente biocompatibile e al tempo stesso bioattivo grazie alla formulazione chimica di nuova generazione. Rilascia ioni calcio e fosfato nel sito di trattamento, stimolando la rapida formazione di cristalli di idrossiapatite nelle microfessure dello smalto dentale, sulla superficie della dentina trattata e nei tubuli dentinali.

Materiale ipoallergenico che non richiede polimerizzazione, privo di resine e sostanze potenzialmente irritanti quali acrilati e aldeidi. Compatibile con i sistemi adesivi.

Ideale nel trattamento della sensibilità associata a:

- ▶ dentina esposta
- ▶ sbiancamento dentale
- ▶ scaling o levigatura radicolare
- ▶ recessione gengivale

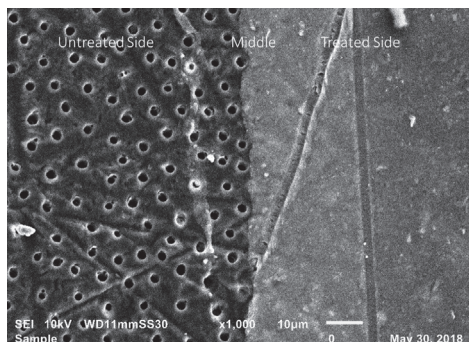

Confronto tra tubuli dentinali non trattati (a sinistra) e tubuli ricoperti da uno strato denso di Predicta® Bioactive Desensitizer (a destra). Immagini University of Washington School of Dentistry.



“Predicta® Desensitiser mi ha colpito fin dal primo utilizzo. Le caratteristiche che mi hanno entusiasmato sono state la compatibilità con i sistemi adesivi, la formulazione in gel per una facile applicazione e il colore che lo rende ben visibile sulle superfici da trattare per un'applicazione precisa.”

Prof. Loris Prosper, Odontoiatra

ART. DESCRIZIONE

S626	Kit 3 siringhe Predicta® Desensitizer, 3 siringhe da 3ml, 30 puntali, 50 microbrush, 1 pozzetto
S625	Three Syringe Kit Predicta® Desensitizer, 1 siringa da 3 ml, 10 puntali, 15 microbrush, 1 pozzetto

Accessori & ricambi

S390	Puntali (precurvati, gialli), 30 pezzi
S391	Microbrush sottile (1.5mm), 100 pezzi

Contatta pmattucci@parkell.com, tel +46 708593481 o visita parkell.eu per ordini o informazioni.
Parkell Europe AB, Finvids väg 8, 194 27 Upplands Väsby, Svezia,